

Elektroniczny pojemnik na soczewki – instrukcja obsługi

1. Elektroniczny pojemnik na soczewki składa się z pojemnika na soczewki i licznika elektronicznego.
2. Jeśli używasz elektronicznego pojemnika na soczewki po raz pierwszy, przytrzymaj przycisk „Count” przez 5 sekund, by aktywować. Jeśli na wyświetlaczu pojawią się cyfry: 13,12,25,3...”, które są testowymi producenta, naciśnij wielokrotnie przycisk „licz”, do momentu kiedy na wyświetlaczu pojawi się „DAY 00”.
3. W zależności od soczewek, których używasz (dwutygodniowych lub miesięcznych) naciśnij „14” lub „30”.
4. Za każdym razem, kiedy zakładasz lub zdejmujesz soczewki kontaktowe naciśnij przycisk „Count” aż do dnia kiedy pojawi się „ 00 „ (np.30,29,28...itd.). Przez 20 sekund rozlegnie się alarm i pojawi się „DAY 00”. Następnie naciśnij jakikolwiek przycisk, aby zatrzymać alarm. Kiedy licznik osiągnął „DZIEŃ 00” pojawi się napis „REPLACE”.
5. Po tym jak pojawi się słowo „REPLACE” umieść nowe soczewki kontaktowe. Następnie naciśnij „14” lub „30”, aby powtórzyć cały proces.
6. Urządzenie zostanie wyłączone po kliknięciu przycisku „Count” przez 5 sekund. Po ponownym włączeniu ponownie uruchomi się wyświetlacz.